



Biovolume

Este é um produto CAD/CAM de alta tecnologia Slice Lab.

Produto:

Este protótipo é desenhado digitalmente e materializado em Biocompatible Photopolymer Resin, classe VI by FormLabs.

Utilização:

Como o biovolume é um protótipo, deve ser utilizado no pré ou transoperatório sob tecidos ou materiais de forma a servir de modelo para obtenção da prótese final.

Esterilização:

Deve-se usar processo de esterilização de baixa temperatura afim de manter anatomia da peça sem distorções. Sugere-se uso de oxido de etileno ou Sterrad.

Autoclavagem de 30 minutos a 120 °C (importante que a autoclave esteja calibrada para evitar distorções na peça).

Advertências:

Produto não estéril.

Uso apenas por profissionais qualificados.

Uso sob tecidos apenas transoperatórios.

(31) 2537-2689

Av. Brasil, 1438 - Sala 1504 - Funcionários, Belo Horizonte - MG, 30140-003

www.slice.com.br